

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения

Laferal, вагинальные суппозитории, 2гр №10

Состав и описание изделия:

CANDIResolve™ (растительный комплекс из полисахаридов из Алоэ Вера, эфирных масел чайного дерева и экстракта грейпфрута), молочная кислота, смесь триглицеридов.

Изделие является адьювантом при лечении и профилактике заболеваний слизистой оболочки влагалища бактериального (таких, как вульвовагинит), грибкового происхождения (таких, как кандидоз), вызывающих сухость, покраснение, зуд и жжение. Создает защитный барьер на слизистой влагалища, обеспечивающий немедленное облегчение, успокаивающее и смазывающее действие. Продукт способствует поддержанию и стабилизации физиологического pH, улучшающее состояние слизистой оболочки влагалища, оказывает смазывающее действие.

Наименование организации-производителя

Biodue S.R.A., Италия

Область применения:

Область применения: местное применение в гинекологии

Назначение:

Для облегчения состояния покраснения, зуда и жжения при лечении заболеваний слизистой оболочки влагалища бактериального (таких, как вульвовагинит), грибкового (таких, как кандидоз) происхождения. В качестве профилактического лечения у лиц с частыми заболеваниями слизистой оболочки влагалища.

Способ применения:

Лечение и профилактика: 1 суппозиторий в день, в течение 10 дней подряд.

Способ введения интравагинально.

Перед применением суппозитория следует провести гигиеническую процедуру, вымыть руки и половые органы теплой кипяченой водой.

Рекомендуется вводить суппозиторий на ночь, чтобы избежать выделения расплавленного суппозитория и достичь необходимого терапевтического эффекта.

Вводится суппозиторий глубоко во влагалище, следует предварительно надеть одноразовый напальчник.

Рекомендуется также вместе с лечением суппозиториями промывать половые органы утром препаратами с живыми молочными культурами с пробиотическим действием, для сбалансирования вагинальной флоры.

Условия хранения:

Хранить в сухом месте, защищенном от источников света и тепла, при температуре не более 30°C.

Не используйте продукт, если упаковка повреждена. Не используйте продукт после истечения срока годности. Дата истечения срока действия относится к продукту, который хранится неповрежденным и надлежащих условиях.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности!

Упаковка

Блистер по 10 суппозиторияев, картонная коробка.

Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства

Biodue S.R.A., Италия

Владелец регистрационного удостоверения:

ClausMarsh, Великобритания

Наименование и адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) от потребителей

ТОО “Altes Pharm” (“Алтес Фарм”), Республика Казахстан
050000, г.Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, д. 498, пом. 64
тел/факс: +7 (727) 292 27 08

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения

Директива Совета Европы 93/42/ЕЭС по медицинским приборам

Побочное действие

Не выявлено каких-либо побочных действий. В случае каких-либо неблагоприятных явлений прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Особые указания:

Неоднородность цвета суппозитория обусловлена наличием экстрактов растительного происхождения и характерна для продукта.

Продукт предназначен для вагинального использования, не принимать перорально.

Не применять при повышенной чувствительности к компонентам продукта.

При беременности или предполагаемой беременности, а также при одновременной местной фармакологической терапии использование продукта должно проводиться только по рекомендации вашего врача.

Используйте только на интегральных слизистых оболочках.

Не использовать продукт, если упаковка или аппликатор были повреждены или вскрыты.

Использовать изделие в соответствии с инструкцией по применению.

Не использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Продукт не предназначен для применения в педиатрии.